

Schritt 2 Füllen Sie das Testbegleitblatt aus

DEPISTAGE DU CANCER DU CÔLON FRIBOURG
DARMKREBS-FRÜHERKENNUNG FREIBURG


Bitte überprüfen, vervollständigen und gegebenenfalls korrigieren


Name: **Falloubaz**
Vorname: **Ernest**
Ledigname: **Falloubaz**
Strasse: **Chemin des Ecoles 1**
PLZ/Ort: **1710 Le Paradis**


Geburtsdatum: **01.01.1960**
Geschlecht: **männlich**

Apotheke: **La Pharmacie de l'Aviation, Le Paradis**

Krankenkasse: **Assurance Tous Risques**
Versicherungsnummer: **12345**
Behandelnde Ärztin/Behandelnder Arzt: **Dr Masanté**

Referenzcode: 
* 1 6 7 6 5 4 3 2 1 0 *

Apothekencode: 
* 1 2 3 4 + 5 6 7 8 *

Testcode: 

Datum der Stuhlprobe:

Bitte unbedingt Name, Vorname und Geburtsdatum mit einem Stift auf das Röhrchen schreiben.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Durchführung des Tests einverstanden und:

- Ich bestätige, dass ich über den Ablauf der Früherkennung, ihre Vorteile und Grenzen informiert wurde.
- Ich bin damit einverstanden, dass meine früheren und aktuellen Daten entweder per Post oder elektronisch an das Früherkennungsprogramm übermittelt und unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften gespeichert werden.
- Ich erlaube den Informationsaustausch zwischen meiner Ärztin/meinem Arzt und den im Früherkennungsprogramm tätigen Fachpersonen.
- Ich bestätige, dass ich darüber informiert wurde, dass meine anonymisierten Daten für statistische Zwecke und zur Verbesserung der Qualität des Früherkennungsprogramms verwendet werden können.
- Ich erlaube, dass bei einem Wohnortwechsel mein vollständiges Dossier an das Früherkennungsprogramm meines neuen Wohnorts weitergeleitet wird.
- Ich erlaube, dass die Ergebnisse einer allfälligen Nachsorge/Abklärung an das Früherkennungsprogramm gemeldet werden dürfen.

Datum: Unterschrift:

A
Prüfen Sie die Richtigkeit der Angaben und korrigieren Sie sie gegebenenfalls.

B
Geben Sie das Testdatum an.

C
Die Klebeetikette mit dem Code muss an der entsprechenden Stelle angebracht werden.
(vorherige Seite, Punkt 7)

D
Datum und Unterschrift.

GEBRAUCHSANWEISUNG DES TESTS

Bitte sorgfältig lesen!

Im Test-Set enthalten sind:

- diese Gebrauchsanweisung
- ein flaches Teströhrchen für die Stuhlprobe
- ein biologisch abbaubares Papier als Auffanghilfe für die Stuhlprobe
- ein Plastikbeutel
- ein Umschlag für den Versand des Tests
- ein Testbegleitblatt

Wichtig

- Schreiben Sie das Datum der Stuhlprobe auf das Testbegleitblatt.
- Schicken Sie den Test und das Testbegleitblatt innerhalb von 24 Stunden ab.
- Frauen sollten den Test nicht während der Menstruation durchführen.

! Werden diese Anweisungen nicht befolgt, können keine zuverlässigen Ergebnisse geliefert werden.

Das Ergebnis wird Ihnen und Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt innerhalb von acht Tagen übermittelt.

Schritt 3 Mit beiliegendem Umschlag innerhalb von 24 Stunden abschicken:

- Plastikbeutel mit Teströhrchen
- Testbeilageblatt

Nicht vor dem Wochenende oder vor Feiertagen abschicken!


Zusätzliche Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Apothekerin/Ihren Apotheker, Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an die Krebs-Früherkennung Freiburg: 026 425 54 00, depistage@liguessante-fr.ch

Schritt 1 Durchführung der Stuhlentnahme




1
Schreiben Sie Ihren Namen,
Vornamen und Ihr Geburtsdatum
auf das Röhrchen.

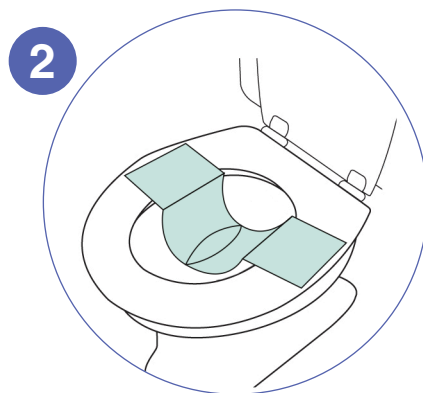


2
Kleben Sie das Papier
als Auffanghilfe für die
Stuhlprobe auf das WC.




3
Stuhlgang erledigen.
Der Stuhl darf nicht mit Urin
oder Toilettenwasser in Kontakt
kommen.

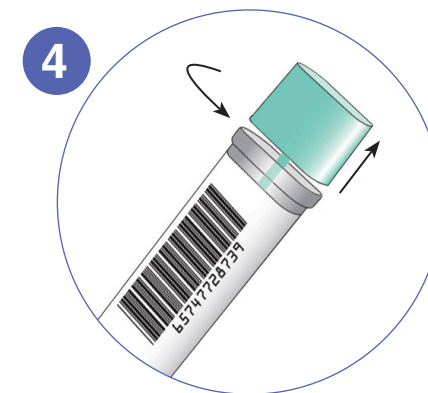

4
Öffnen Sie das Röhrchen,
indem Sie den Deckel
abschrauben. Achten Sie
darauf, dass die darin enthaltene
Flüssigkeit nicht austritt.

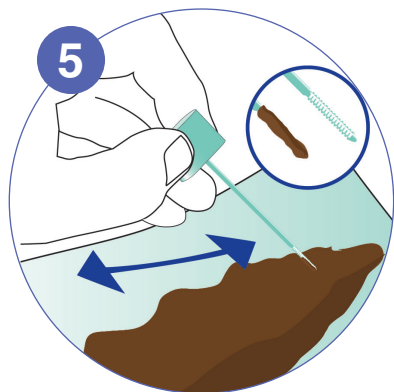

5
Entnehmen Sie mit dem türkis-
farbenen Stäbchen an 5 bis 6
verschiedenen Stellen etwas Stuhl.
Alle Rillen im Stäbchen müssen mit
Stuhl bedeckt sein.

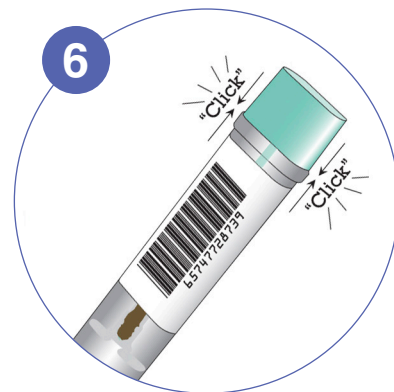

6
Stecken Sie das Stäbchen
wieder in das Röhrchen und
verschliessen Sie es gut.
Ein hörbares Klicken bestätigt,
dass es verschlossen ist.
Schütteln Sie das Röhrchen.



7
Ziehen Sie die Etikette mit dem
Strichcode vom Röhrchen ab und
kleben Sie sie auf die angegebene
Stelle auf dem Testbeilageblatt.
(nächste Seite, Punkt C)



8
Geben Sie das Röhrchen
in den Plastikbeutel und
verschliessen Sie ihn.